Alma PrimeX | Manipoli



UltraWave

Il rivoluzionario manipolo UltraWave combina la tecnologia ad ultrasuoni trasversali e attraverso la piastra extra-large consente di modellare il corpo ad una velocità maggiore, riscaldando così il tessuto e colpendo maggiormente le cellule adipose difficili da rimuovere.

Combina 4 tecnologie rivoluzionarie: ConeX, Impulse, MaXimize, ReACCT.



UniBody

Il manipolo **UniBody** combina la tecnologia Alma Unipolare con un applicatore rotante per massaggi linfodrenanti e rimodellanti per il corpo. L'esclusiva tecnologia a Radiofreguenza, la più potente sul mercato a 40,68 MHz, fornisce un riscaldamento cutaneo a 4 profondità distinte del derma, garantendo così una migliore neocollagenesi ancora più profonda ed omogenea. L'inversione di polarità delle molecole d'acqua genera un importante riscaldamento dielettrico che prende di mira il collagene dermico stimolandone così la formazione di nuovo.



Xcentuate

Progettato unicamente per il rimodellamento del corpo e il rassodamento della pelle di ampie aree di trattamento, **Xcentuate** fornisce **energia RF** attraverso due manipoli indipendenti e regolabili a temperatura ambiente e un meccanismo di raffreddamento che rende il trattamento confortevole.

NOVITÀ - Alma Air

Per assicurarti il **massimo del comfort** abbiamo sviluppato **Alma Air**, una cintura regolabile progettata per **agevolare il tuo lavoro** e renderlo meno faticoso.

Alma Air sostiene la schiena e migliora la postura grazie al suo design funzionale evitando di avere pesi superflui durante l'esecuzione del trattamento.

Comodo e confortevole, è realizzato con un **materiale traspirante** per prevenire la sudorazione.





Alma PrimeX REFINING EVERY BODY





www.almalasers.it - info@almalasers.it







X Factor di PrimeX


La tecnologia Alma PrimeX, leader nel rassodamento del corpo, è basata sull'esclusivo brevetto di Alma, US e RF, ad onde trasversali, con una combinazione di 4 tecnologie rivoluzionarie che insieme regalano risultati ottimali ad ogni trattamento.



Il manipolo ha un'esclusiva forma conica che amplifica le onde acustiche nei tessuti e minimizza la riflessione delle onde ultrasoniche, senza la focalizzazione centrale dell'energia.



Gli ultrasuoni vengono erogati ad impulsi programmabili dall'operatore a seconda del risultato che si vuole ottenere. Tale emissione crea piccole onde d'urto, rendendo il trattamento più efficace.

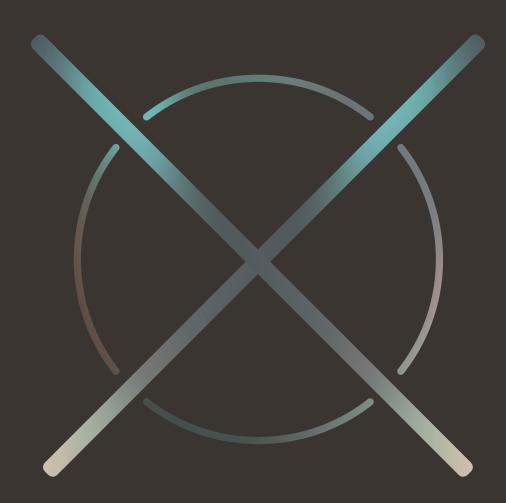



La funzione di Vacuum facilita il mantenimento di un contatto continuo tra il manipolo e la pelle garantendo così la massima erogazione degli ultrasuoni nell'area da trattare per ottimizzare i risultati.



Il sistema riconosce le caratteristiche del tessuto automatizzando la produzione di energia. La tecnologia ad ultrasuoni viene regolata durante la sessione per adattarsi alle caratteristiche fisiche del paziente.



PrimeX Pro (UltraWave + Xcentuate)

Combinando i manipoli **UltraWave** e **Xcentuate**, il trattamento **PrimeX Pro** è ideale per ridurre la circonferenza e donare un leggero rassodamento alla pelle. Una volta erogate le onde a Ultrasuoni di UltraWave per trattare il grasso, le onde a Radiofrequenza di Xcentuate agiscono per **rassodare la pelle e migliorarne la consistenza**. Il manipolo Xcentuate consente il controllo automatizzato del trattamento.

Durata	Numero	Intervallo tra una
trattamento	sedute	seduta e l'altra
30 minuti UltraWave 20 minuti Xcentuate	3	

PrimeX Classic (UltraWave)

Risultati eccellenti in soli 20 minuti

PrimeX Classic è ideale per una massima riduzione della circonferenza corporea. Gli ultrasuoni agiscono sugli adipociti in modo non invasivo, per **ridurne il volume**, in un trattamento indolore che si traduce immediatamente in una **silhouette più snella e scolpita**.

Durata	Numero	Intervallo tra una
trattamento	sedute	seduta e l'altra
20 minuti	4	1 settimana









Dopo 1 mese

Dopo 3 me

PrimeX Premium (UltraWave + UniBody)

Per il massimo rimodellamento e rassodamento della pelle

Il trattamento con **PrimeX Premium** colpisce diversi strati della pelle fornendo risultati sinergici per ridurre la cellulite e rassodare la pelle in maniera più intensa.

Il manipolo UltraWave **colpisce il grasso localizzato**, **riducendo la circonferenza e modellando la silhouette**. Segue il rassodamento della pelle utilizzando le onde a radiofrequenza del manipolo UniBody che, grazie al massaggiatore rotante fissato su di esso, assicura una profonda penetrazione del calore e una maggiore circolazione, riducendo la cellulite e migliorando la texture della pelle.

Durata	Numero	Intervallo tra una
trattamento	sedute	seduta e l'altra
20 minuti	4	









Prima Dopo 1 settimana

Dopo 1 mese